


K-UMI Manipulator

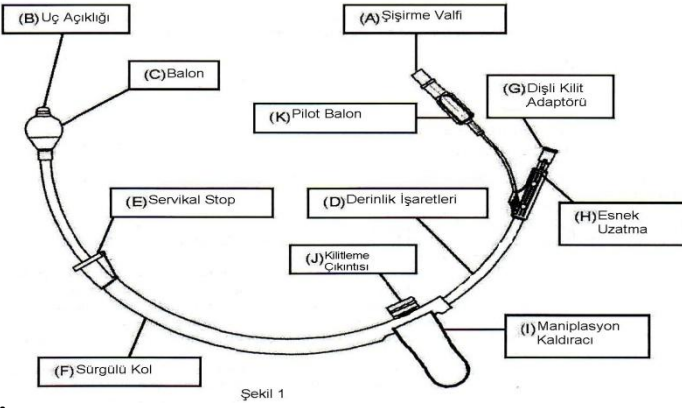

Şekil 1

Ürün Tanımlanması:

K-UMI Manipulator hem bir rahim manipulatörü hemde bir rahim enjektörüdür. Latex içermeyen, steril, atılabilir, tek kullanımlık bir üründür. Biri balonu şişirmek ve diğeri sıvı enjekte etmek için kullanılan iki lümene ve bir shafta sahiptir. Ürün kadın anatomisine uyum sağlamak için kavisli yapılmıştır. K-UMI Manipulator kateter shaftına kilitlenebilir bir sürgülü kola sahiptir. Bu istenen ölçüm derinliğinde servikal stop noktasını konumlandırmayı sağlar. Balon rahim içinde şişirilir ve internal os a doğru geri çekilir. Servikal stop noktası kateter shaftı üzerinden servikse doğru ilerletilir ve sıkıca bastırılarak kilitlenir. Sürgülü kol kilitlendiğinde K-UMI Manipulator rahimi travmasız ve güvenli tutar. Bu ürün 37 cm uzunluğa ve 5 mm (15 Fr) O.D ye sahiptir.

Endikasyonlar:

Laparaskopi, Tüplerin Bağlanması, Fertilité incelemeleri ve Tüplerin alınması sırasında rahimi maniple etmek. Rahime sıvı enjekte edilirken servikal os u kapatmak.

Kontrendikasyonlar:

Gebelik
Rahim veya Tubal enfeksiyon

Uyarılar:

Fazla güç uygulanması durumunda rahim delinmesi veya ürünün bükülerek kırılması sonucu rahim ve vajina travmalarına sebep olur. Manipulasyon sırasında sürgülü kolun kilitlenmemesi veya yanlış derinlikte kilitlenmesi rahim travmalarına neden olur. Rahim travmalarından kaçınmak için manipulasyondan önce balonu şişirerek kontrol edin. Rahim travmalarını önlemek için Manipulatörü uygun bir doğrultu boyunca yerleştirin.

Tedbirler:

Ürünü kullanmadan önce olası hasar için şişirilebilir balonu test edin. Yerleştirmeden önce ucunu kayganlaştırın. Ürünün kolay yerleştirilmesi ve balonun yırtılmasını önlemek için serviksin genişletilmesinin gerekliliğini kontrol edin. Üreticinin tavsiyesine uygun sıvıları enjekte edin.

Yan Etkiler:

Kramp Rahim Travması veya Delinmesi
Enfeksiyon Rahim Spazmı

Ürün Bilgileri:

Ürün Numarası : TMI6003
OD Ölçüleri : 5 mm
Uzunluk : 37 cm
Ambalaj : Kutuda 12 Adet, Steril

Kullanım Talimatları:

- 1-Paket içindeki ürün ambalajının hasarsız ve yırtılmamış olduğundan emin olun.
- 2-Sürgülü kolun (F) kilitlenmemiş ve kolayca sürülebilir olduğundan emin olun.
- 3-Standart bir şırınga ile balonu (C) şişirme valfinden (A) 6 cc hava ile şişirin ve testten sonra söndürün.
- 4-Rahim derinliği ve yönünü ölçün.
- 5-Eğer gerekiyorsa serviksi genişletin.
- 6-Kolay yerleştirme için ucu (B) ve balonu (C) kayganlaştırın. K-UMI Manipulatörü serviks eksenini boyunca düz olarak incitmeden dikkatlice ilerletin.
- 7-Sürgülü kolu (F) proksimal uca (F) doğru Kateter shaftı üzerinde ölçülen derinlik ile aynı yerde (D) konumlandırın. Eğer fundus 6 cm ölçüldü ise sürgülü kolu (F) 6 cm derinlik işaretini (D) olan yere ayarlayın.
- 8-Ölçülen derinliğe göre konumlandırılmış sürgülü kolu (F) serviks içinden yavaşça servikal durak (E) serviks yüzeyine dokununcaya kadar ilerletin. Balonu (C) yavaşça 3-10 cc hava ile şişirin. Şırıngayı şişirme valfinden (A) çıkarırken havanın şırıngaya geri kaçmaması için baş parmağınızı pistonun üzerinde tutun.
- 9-Sürgülü kolu (F) kateter shaftı serviks rahat tutuncaya kadar yavaşça ilerletin. Sürgülü kolun (F) kilit çıkıntısını (J) birleşme yerine oturtturarak kilitleyin. K-UMI Manipulatör şimdi kilitlidir ve rahmi sıkıca kavramıştır.
- 10-Not: 6 cm lik derinlik (D) işaretini, kateter ucundan(B) servikal durağa (E) kadar olan 5 cm lik mesafeye eşittir. Bu 1 cm lik fark yerleştirme derinliğinde bir güvenlik marjı sağlar.
- 11-Balonun(C) işlem sırasında patlamadığından emin olmak için pilot balonun (K) gerginliğini kontrol edin. Yumuşak balon bir yırtılma veya sızıntı olduğunu gösterir.
- 12-Düzgün yerleştiğinden emin olmak için aleti hafifçe çekin.
- 13-Manipulasyondan ve enjeksiyondan önce pilot balonun şişkinliğinden balonun (C) şişirilmiş olduğunu kontrol edin. Servikal sızdırmazlık kaybolduğunda boşluk oluşur. Sönmüş balon rahim travma tehlikesini artırır.
- 14-Mekanik bir avantaj sağlamak için manipulasyon kolu kaldıracını (I) kavrayın.
- 15-Dişli kilit adaptörüne (G)eklenmiş şırıngayı doğruca boşaltın. Esnek uzatma (H) şırınga hareketi için gerginlik rahatlaması sağlar.
- 16- K-UMI Manipulatörü çıkarmak için, Şırıngayı şişirme valfine (A) takın ve balonu (C) söndürün. Kilit sekmesini (J) kaldırarak sürgülü kolun (F) kilidini açın. Dikkatlice aleti geri çekin. Aleti atmadan önce tam olduğundan ve içeride hiçbir parçasının kalmadığından emin olun.

ÜRETİCİ:

Catheter Research, Inc
dba Thomas Medical, Inc
5610 W. 82nd Street
Indianapolis, IN 46278 USA
Telephone: (800) 556-0349
(317) 872-0074
Fax: (317) 872-0169

AT. TEMSİLCİSİ

Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands
T: 31 70 345 8570
F: 31 70 346 7299



Doc. No: 200849-001 rev.4

Düzenleme Tarihi: 19/03/2010